


Kliniderm[®] debride

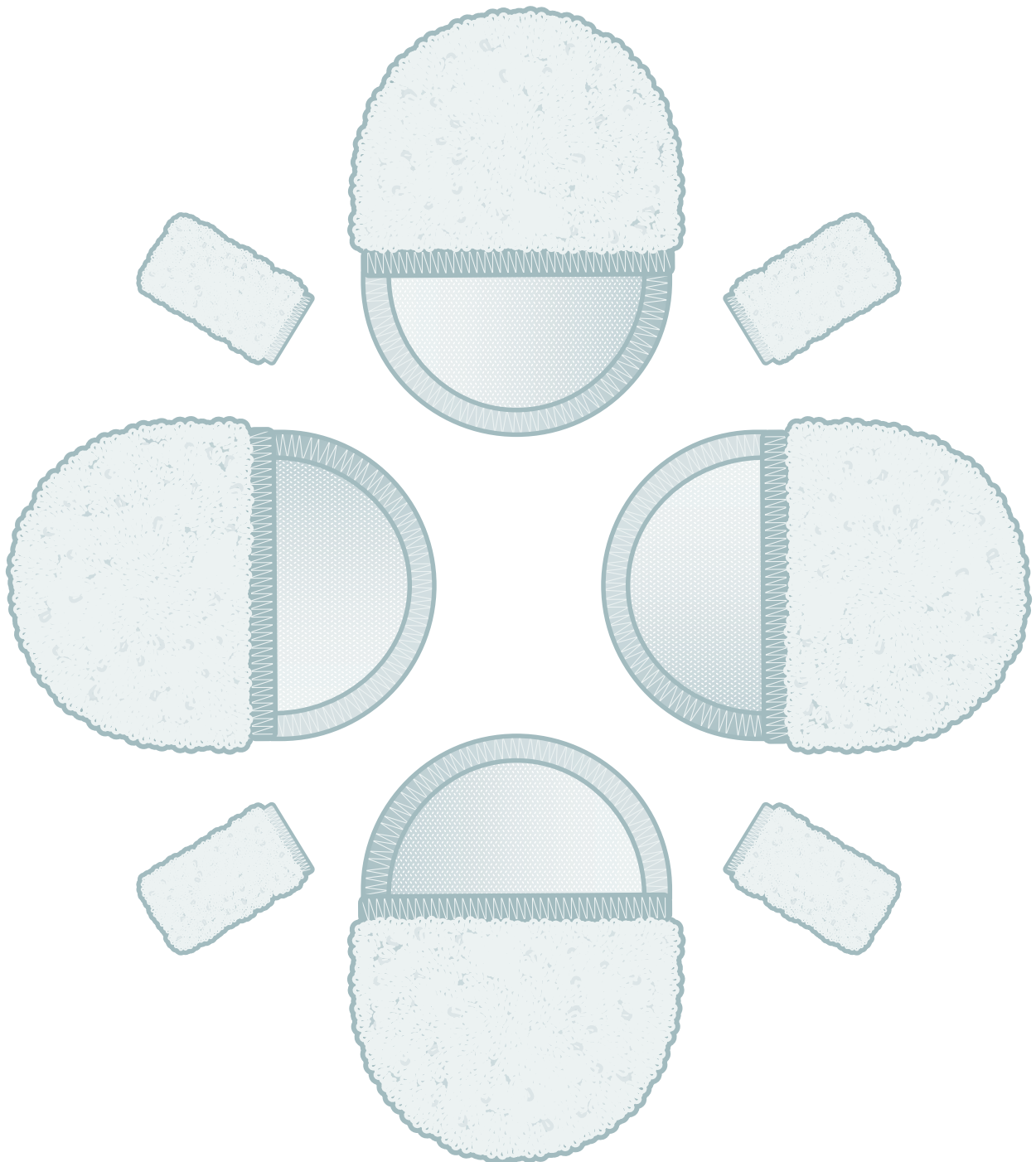

Mjuk • Effektiv • Säker

Kliniderm® debride

Kliniderm® täcker de avancerade produkterna från Klinion – ett välkänt sårvårdsmärke. I över 30 år erbjuder Klinion globala patienter bra kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser. Med ett brett sortiment säkerställer Kliniderms produkter optimal användarkomfort.

Kliniderm® Debride är avsedd som en snabb, mycket effektiv och säker metod för mekanisk debridering. Används för att absorbera exsudat, cellrester och keratos under debridering och är skonsamt mot intakt vävnad. Kliniderm® Debride Pocket finns för mindre ytliga sår eller när extra kontroll behövs när man applicerar tryck.

Indikationer

Kliniderm® Debride är lämplig för behandling av ytliga sår (akuta och kroniska) och den omgivande huden.

- Diabetes fotsår
- Venösa och artiella sår
- Trycksår
- Postoperativa sår
- Skrubbsår
- Brännskador, skällning
- Lymfödem
- Nekrotisk vävnad

Kliniderm® Debride har en mycket bra rengöringseffektivitet, effektiv bakteriebindning och mycket hög grad av biofilmborttagning. Den möjliggör mjuk debridering utan vävnadsirritation och har en mjuk ock skonsam applicering.


Applikation

Kliniderm® Debride och Kliniderm® Debride Pocket kan användas omväxlande. Fickstorleken rekommenderas vid behandling av små sår eller när extra kontroll behövs, medan kliniderm Debride rekommenderas för behandling av stora ytliga sår. Mekanisk debridering med Kliniderm® Debride uppnås bäst genom att följa anvisningarna nedan

1. Blötlägg Kliniderm® med cirka 50-60ml vatten eller sårrengöringslösning enligt lokala riktlinjer
 2. För den fuktiga sidan mot såret i en cirkulerande rörelse samtidigt som du applicerar ett lätt tryck
-

Mjuk, effektiv rengöring

Mekanisk debridering är en effektiv metod för att avlägsna cellrester, devitaliserad vävnad och keratos från såret. Sårrengöringsdynan med monofilament i polyester kan användas istället för traditionella gasväv för att effektivt rengöra såret

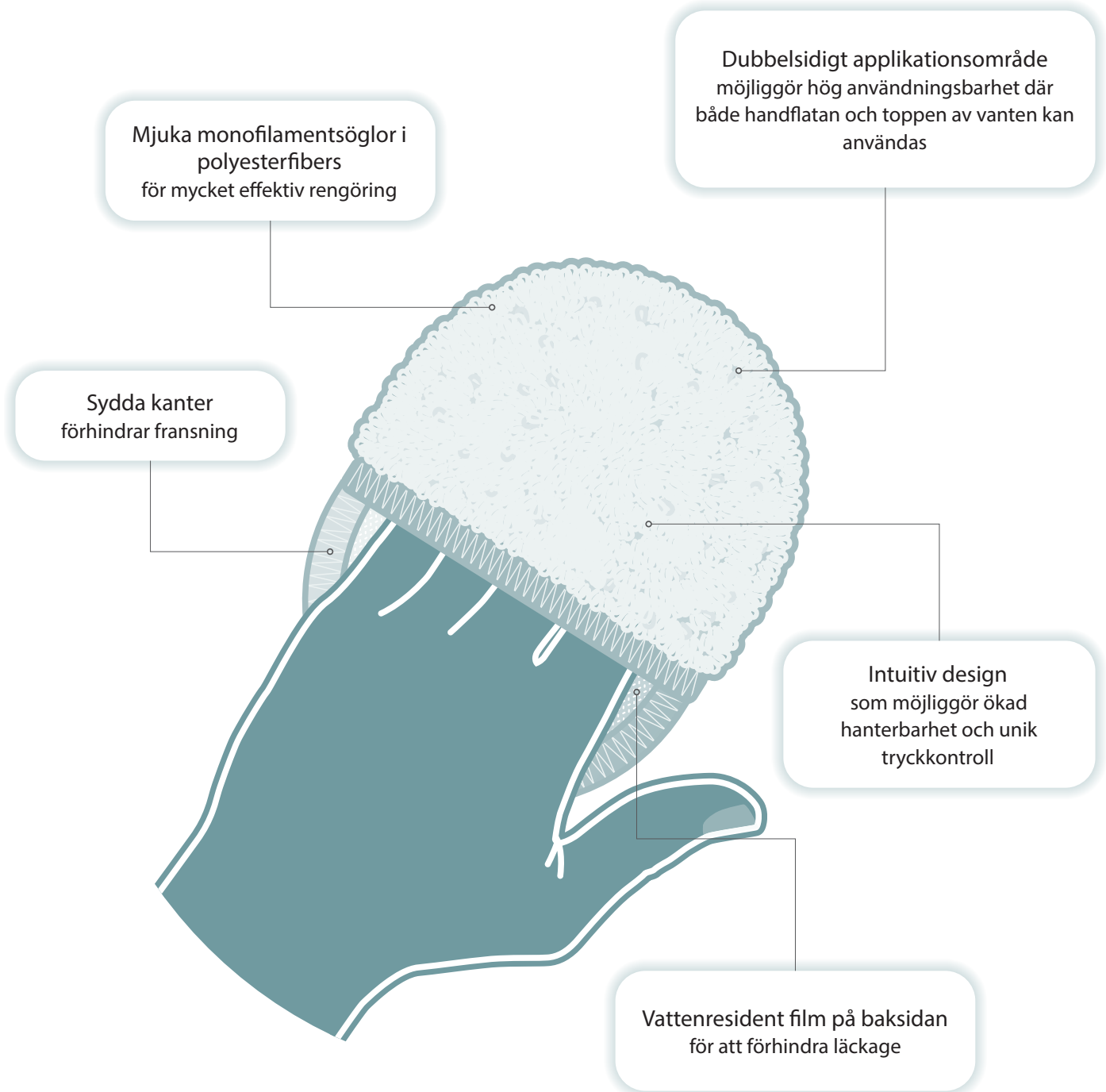

Säker, mycket effektiv och snabb mekanisk debridering



Mjuka monofilamentsöglor
Hjälper till att minimera smärta
och är skonsam mot intakt
vävnad



Mjuk och skonsam applicering
Tillåter kontroll för att applicera
rätt tryck



Absorberar exsudat
För att möjliggöra effektiv
rengöring under debridering



Pocket
När extra kontroll är nödvändigt



Rengöring
För att ta bort bakterier och
biofilm från såret



Intuitiv design
Dubbelsidig användning av
dynan

