



Cathejell

Cathejell- katetergel med Lidokain

Steril katetergel med anestetikum för smärtlindring. Katetergelen som är vattenlöslig, ger en klar syn för alla instrument.

Bälgen har en invändig avbrytbar spets, vilket gör det lätt att öppna och använda gelen med en hand. Bedövningen verkar efter ca 4-5 minuter.

Sammansättning:

100 g innehåller: 2 g Lidokainhydroklorid,
0,05 g Klorhexidindihydroklorid (MV-400065)

Latex- och PVC fri.

Art.nr.	Utförande	Vikt g	Förp.
MV-400065	med klorhexidin	12,5	25 st
MV-400063	utan klorhexidin	12,5	25 st

Leverantör




För mer information / Order


Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

Bruksanvisning

- Rengör urinrörsmynningen
- Bryt av spetsen på applikatorn

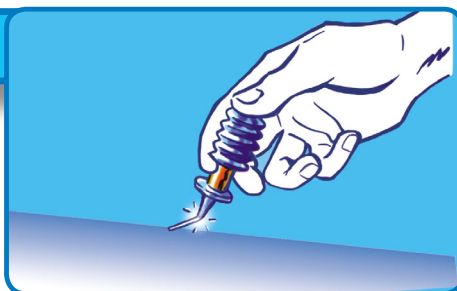

- Pressa ut en droppe Cathejell för att underlätta införandet av munstycket
- Håll konstant tryck på bälgen under instillation
- Låt verka under 5-10 min
- Applicera vid behov Cathejell på produkten innan införande

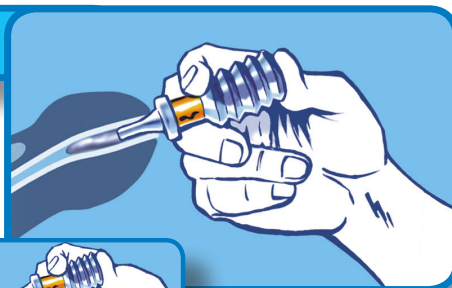

Nöjda patienter

- Skonsam kateterisering
- Inga mikroskador
- Ingen smärta

